

INSTRUÇÕES

O uso pretendido deste kit é a coleta e preservação da amostra para processamento de teste genético. Estas instruções destinam-se ao enfermeiro ou profissional de saúde que realizará a punção venosa do paciente. Este kit não é aplicável para auto-teste.



Passo 1: Contate-nos

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com
Unidade Recife: labrecife@igenomix.com
Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com

Solicite o transporte para:

logisticabrasil@igenomix.com



Passo 2: Recebimento do kit

O Kit contém:

- Tubo EDTA 4ml (verifique a data de validade do fabricante).
- Envelope Bolha (recipiente secundário).
- Saco zip para risco biológico.
- Formulário de requisição do Teste e Termo de consentimento

*Nota: Conservar o kit em temperatura ambiente até o uso. Verifique a data de validade antes do uso. Caso o tubo esteja expirado ou danificado, descartá-lo de acordo com a legislação local e contatar a Igenomix para receber o novo kit.



Passo 3: Coleta da amostra

Notas importantes:

- Informe no formulário de requisição do teste se algumas dessas situações se aplica ao seu caso, como: Transplante de medula óssea, Transfusão sanguínea (<60 dias), e/ou Quimerismo congênito ou adquirido.

Preparo do Paciente:

- Não é necessário jejum para a realização do teste.

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações (Formulário de Requisição do Teste e Termo de Consentimento).
- Documentações (Formulário de Requisição do Teste e Termo de Consentimento) não preenchidos corretamente.
- Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
- Ausência de assinatura do paciente e/ou médico no Formulário de Requisição do Teste e/ou Termo de Consentimento.
- Amostras de sangue hemolisada ou coagulada ou volume abaixo do recomendado ou fora das especificações de qualidade.
- Tubo danificado e/ou não identificado e/ou validade vencida e/ou contendo outro tipo de conservante.

Coleta de Sangue

- Coletar 3ml de sangue no tubo EDTA. Amostras com sangue <3 ml podem ser rejeitadas. Para recém-nascido, mínimo de 1 ml, sendo 3 ml recomendado.
- Após a coleta de sangue, misture imediatamente o conteúdo invertendo suavemente de 8 a 10 vezes.

Após a coleta de sangue:

- Etiquetar o tubo com duas identificações (seguindo uma das opções abaixo):
 - Nome completo do paciente e data de nascimento ou
 - Nome completo do paciente e número de ID do paciente

INSTRUÇÕES

**Passo 4:**
Acondicionamento e embalagem da amostra

- Acondicionar a amostra refrigerada (2-8°C) até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta é de 5 dias. NÃO congele. É aconselhável enviar a amostra dentro de 48 horas após a coleta.
- Após a coleta da amostra, colocar o tubo dentro do envelope bolha (embalagem secundária) para proteger contra impacto e vazamento de líquido. Introduzir dentro da caixa rígida (embalagem terciária) para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento do Teste, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- Enviar a amostra em temperatura ambiente.
- Inclua barra de gelo reciclável na embalagem de transporte sem que haja contato direto com a amostra para evitar o congelamento, se a temperatura ambiente exceder 35°C. Para mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.
- Em caso de usar outro tipo de recipiente não fornecido pela Igenomix, não exceder o tempo de armazenamento do fabricante.

**Passo 5:**
Transporte da amostra

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.
- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**
Unidade São Paulo: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs, sábado das 09:00 às 12:00 hs.
Unidade Recife e Porto Alegre: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs.
Feriados podem causar interrupções no serviço.
- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!
- Quando optar pelo transporte através de Correios, seguir as instruções da agência do local.

**Passo 6:**
Resultados dos testes

O cliente receberá o resultado no prazo estabelecido para o teste solicitado a partir da recepção das amostras na Igenomix. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.

**Informações adicionais**

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

São Paulo
 (11) 31975846

Recife
 (81) 40420057

Porto Alegre
 (51) 35000876