

INSTRUÇÕES

O uso pretendido deste kit é a coleta e preservação da amostra para processamento de teste genético. Estas instruções destinam-se ao profissional de saúde que realizará a coleta do material biológico. Este kit não é aplicável para auto-teste.



Passo 1: Contate-nos

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com

Unidade Recife: labrecife@igenomix.com

Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com

Solicite o transporte para:

logisticabrasil@igenomix.com



Passo 2: Kit de coleta

O médico deverá coletar a amostra de acordo com o tipo de material:

- Vilosidade coriônica ou líquido amniótico: Seringa estéril (Não fornecido pela Igenomix)
- Sangue fetal (cordocentese): Tubo de Heparina (Fornecido pela Igenomix) + Envelope bolha contendo papel absorvente (embalagem secundária)
- Formulário de Requisição do Teste e Formulário de Consentimento



Passo 3: Coleta da amostra

Notas importantes:

Preparo do paciente:

- A coleta do material deverá ser realizada por médicos especialistas em ambientes ambulatoriais ou hospitalares.

Recomendações para coleta:

- Vilosidade coriônica: realizado entre 11ª até a 14ª semana de gestação.
- Líquido amniótico: entre 15ª até a 20ª semana de gestação ou até mais precocemente (11ª a 14ª semanas), dependendo do caso.
- Sangue fetal: a partir da 20ª semana de gestação.

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações e ausência de assinatura do paciente e/ou médico (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento)
- Documentações (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento) não preenchidos corretamente.
- Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
- Ausência de assinatura do paciente e/ou médico no Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento.
- Tubo danificado e/ou não identificado e/ou validade vencida e/ou contendo outros tipos de conservantes.

Coleta da amostra:

- Vilosidade coriônica: ao redor de 10mg de tecido coletado com meio de cultura ou soro fisiológico. Nunca adicionar formol.
- Líquido amniótico: 10 a 20 mL. Ao enviar a amostra na seringa, certifique-se de retirar a agulha para evitar acidentes.
- Sangue fetal: 10 a 20 mL.

Condições específicas para coleta de sangue fetal:

1. Coletar 10mL de sangue em tubo de heparina.
2. Após a coleta de sangue, homogeneizar imediatamente o conteúdo invertendo suavemente de 8-10 vezes.

Após a coleta do material:

- Etiquetar o tubo ou seringa com duas identificações (seguindo uma das opções abaixo):
 - Nome completo do paciente e data de nascimento ou
 - Nome completo do paciente e número de ID do paciente

Amostras transportadas fora das especificações, amostra contendo sangue coagulado e volume abaixo do recomendado poderão ser rejeitadas

INSTRUÇÕES

**Passo 4:****Acondicionamento e embalagem da amostra**

- Acondicionar a amostra refrigerada (2-8°C) até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta até a chegada na Igenomix é de 24 horas. NÃO congele.
- Após a coleta da amostra, colocar o tubo dentro do envelope bolha (embalagem secundária) para proteger contra impacto e vazamento de líquido. Introduzir dentro da caixa rígida (embalagem terciária) para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento do Teste, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- Enviar a amostra refrigerada (2° a 8°C). Não é recomendado o transporte em temperatura ambiente e nunca congelado.
- Inclua barra de gelo reciclável na embalagem de transporte sem que haja contato direto com a amostra para evitar o congelamento. Para mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.

**Passo 5:****Transporte da amostra**

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.

- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**

Unidade São Paulo: segunda à quinta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Outras unidades: segunda à quinta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Feriados podem causar interrupções no serviço. No caso de qualquer interrupção, a Igenomix comunicará no momento do agendamento.

- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!

**Passo 6:****Resultados dos testes**

O cliente receberá o resultado no prazo estabelecido para o teste solicitado a partir da recepção das amostras na Igenomix. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.

**Informações adicionais**

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

São Paulo



(11) 31975846

Recife



(81) 40420057

Porto Alegre



(51) 35000876