

INSTRUÇÕES

O uso pretendido deste kit é a coleta e preservação da amostra para processamento de teste genético. Estas instruções destinam-se ao enfermeiro ou profissional de saúde que realizará a coleta. Este kit pode ser auto-aplicável pelo paciente.



Passo 1: Contate-nos

Solicite o kit para a Unidade mais próxima de você:

Unidade São Paulo: solicitakits@igenomix.com

Unidade Recife: labrecife@igenomix.com

Unidade Porto Alegre: labpoa@igenomix.com

Solicite o transporte para:

logisticabrasil@igenomix.com



Passo 2: Recebimento do kit

O Kit contém:

- 1 swab bucal (Verificar data de validade do fabricante)
- Envelope Bolha (recipiente secundário).
- Saco zip para risco biológico.
- Formulário de requisição do Teste e Termo de consentimento

Nota: Lave as mãos antes de abrir o kit. Preferencialmente use luvas estéreis para evitar a contaminação. Caso a data do swab bucal tenha expirado ou a embalagem tenha sido danificada de qualquer forma que a esterilidade possa ser comprometida, descarte de acordo com a legislação local. Em seguida, entre em contato com a Igenomix para receber um novo kit.



Passo 3: Coleta da Amostra

Notas importantes:

Preparo do Paciente:




- NÃO comer, beber, fumar ou mastigar chiclete por 30 minutos antes de coletar a sua saliva.

Os seguintes casos podem levar a rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas pelas documentações (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento).
- Documentações (Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento) não preenchidos corretamente.
- Falta de dados obrigatórios, identificados no formulário com um asterisco (*).
- Ausência de assinatura do paciente e/ou médico no Formulário de Teste de Requisição e Termo de Consentimento.
- Tubo danificado e/ou não identificado e/ou validade vencida.

Como coletar a amostra:

1. Higienize as mãos e abra o tubo do swab bucal. Introduza o swab na parte inferior da bochecha e realize movimentos giratórios suaves em contato com a parede celular (**figura 1**).

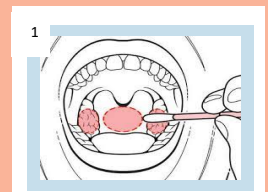

2. Com cuidado, retire o swab e introduza no tubo coletor. Evite tocar o swab em qualquer superfície ou contato com a pele.

Após a coleta de saliva

Etiquetar o tubo com duas identificações (seguindo uma das opções abaixo):

- Nome completo do paciente e data de nascimento ou
- Nome completo do paciente e número de ID do paciente

INSTRUÇÕES



Passo 4: Acondicionamento e embalagem da amostra

- Acondicionar a amostra em temperatura ambiente até o transporte. Tempo de estabilidade após a coleta é de 30 dias. NÃO congele nem guarde no refrigerador. É aconselhável enviar a amostra o mais rápido possível.
- Após a coleta da amostra colocar o tubo dentro do envelope bolha, lacrar para proteger contra vazamento de líquido. Introduzir dentro da caixa rígida (embalagem terciária) para o transporte.
- Introduzir o Formulário de Requisição e o Termo de Consentimento, devidamente preenchidos e assinados, dentro da caixa de transporte sem que haja contato direto com a amostra.
- Enviar a amostra em temperatura ambiente (não congelar).
- Inclua barra de gelo reciclável na embalagem de transporte sem que haja contato direto com a amostra para evitar o congelamento, se a temperatura ambiente exceder 35°C. Para mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.



Passo 5: Transporte da amostra

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.
- **O horário de recebimento para processamento deste teste:**
Unidade São Paulo: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs, sábado das 09:00 às 12:00 hs.
Unidade Recife e Porto Alegre: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs.
Feriados podem causar interrupções no serviço.
- Caso possua acordo de transporte com a Igenomix, realizar o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência a coleta. Atenção aos feriados!
- Quando optar pelo transporte através de Correios, seguir as instruções da agência do local.



Passo 6: Resultados dos testes

O cliente receberá o resultado no prazo estabelecido para o teste solicitado a partir da recepção das amostras na Igenomix. Para mais informações acessar o nosso site www.igenomix.com.br.



Informações adicionais

Para qualquer dúvida, entre em contato com a unidade mais próxima

São Paulo

 (11) 31975846

Recife

 (81) 40420057

Porto Alegre

 (51) 35000876